


IPV®呼吸回路 組立手順

インライン呼吸回路:人工呼吸器併用

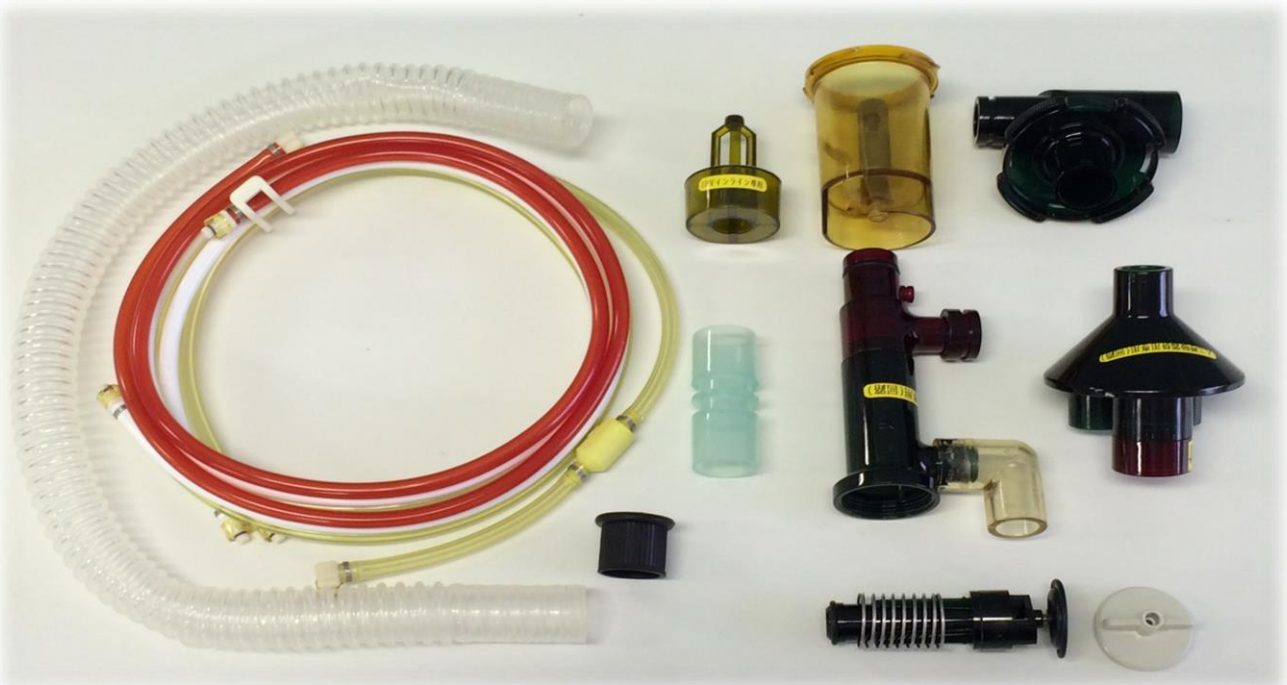


PERCUSSIONAIRE® JAPAN

インライン呼吸回路：組立手順

1. 患者に使用する前にIPV®呼吸回路が滅菌済か確認する。
2. インライン呼吸回路のネブライザーを組立てる。

ネブライザーボウルの芯が
しっかりはまっていることを

黒いパットがあるかどうか要確認！

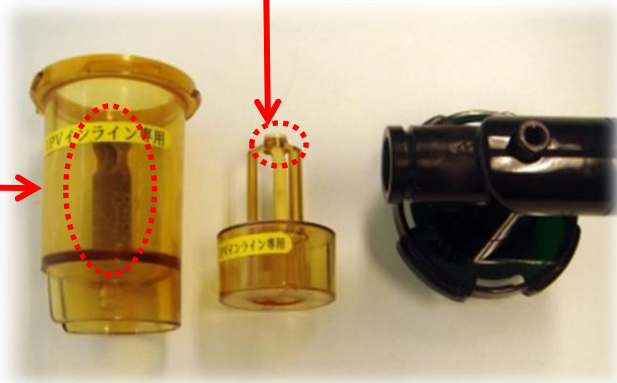

フリーバルブ

キャップは二段締め



3. ファジトロンを組立てる。



ベンチュリー管先のO-リングがあることを確認！




O-リングが無い状態



O-リングが有る状態

4. 蛇腹管を接続する。

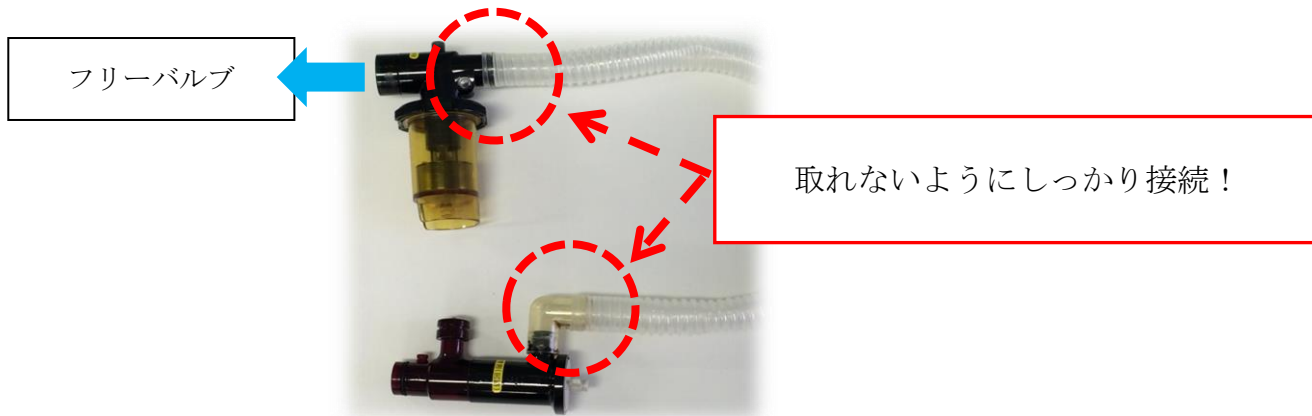


5. コーンコネクターに呼吸器のYピースを接続する準備をする。





* ただし直接繋がられる場合は直接接続する。





注意：ダブルコネクターはなるべく避けたいが、併用する人工呼吸器回路のYピースの接続が不可能な時に限りもう一つコネクターを使用する。

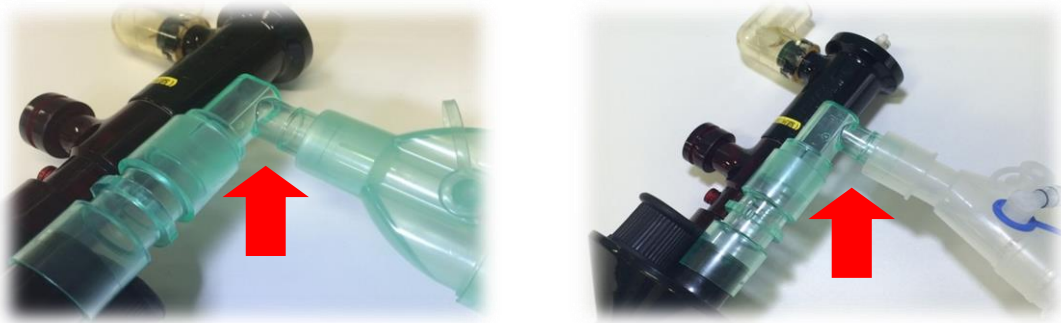


6. ファジトロンをコーンコネクターに接続する。

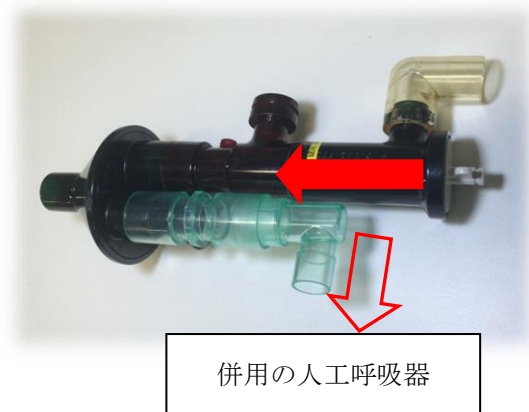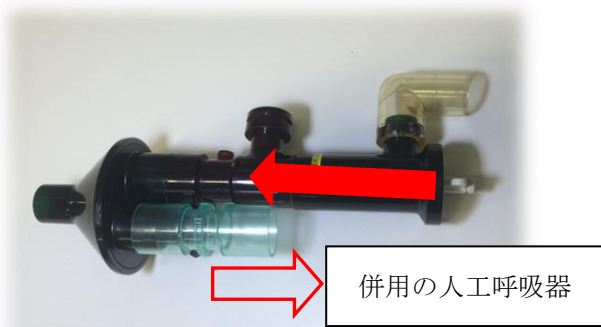

7. 3連チューブを接続する。

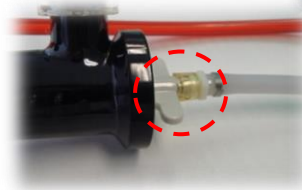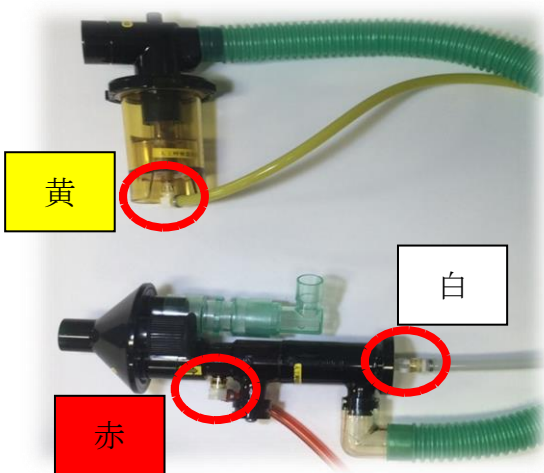


8. コーンコネクターの先を患者側のインターフェイスと接続する。
必要であればコネクターを使用する。




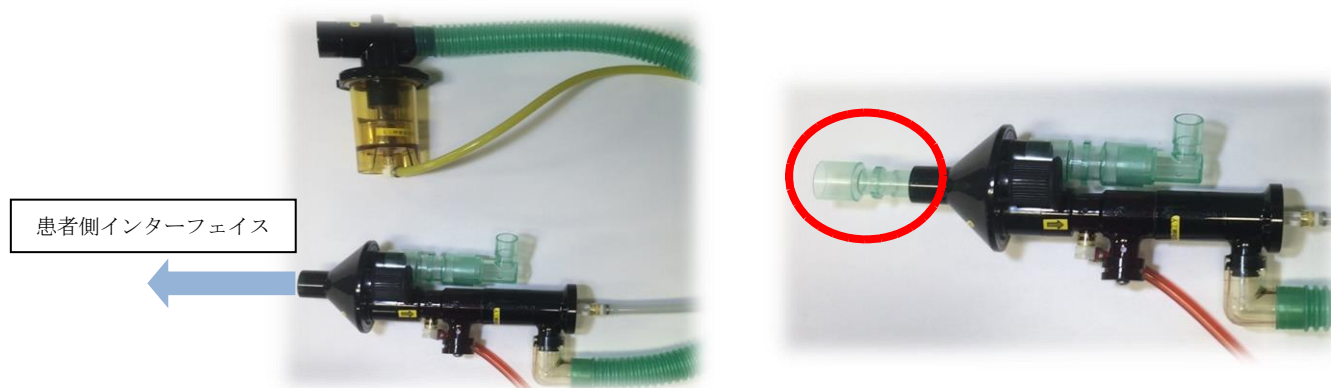


* コーンコネクター先のサイズは15F。接続口が22Fなどのカテーテルマウントなどを使用している場合はコーンコネクター側が22Mになる様にコネクターを使用する。

9. IPV®本体と「本体側」と書いてある3連チューブを接続する。
(赤のラインにはバクテリアフィルターが付いていることを確認する)

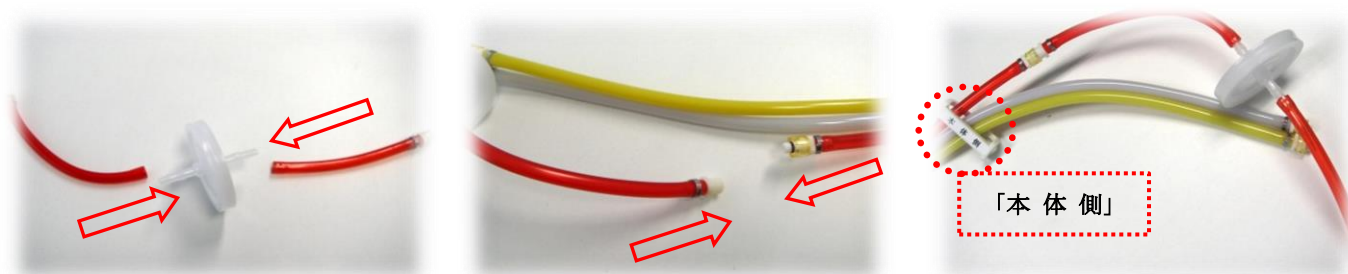

*インライン呼吸回路に使われているコネクター

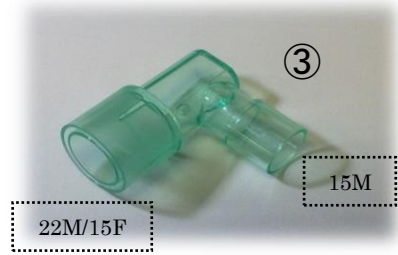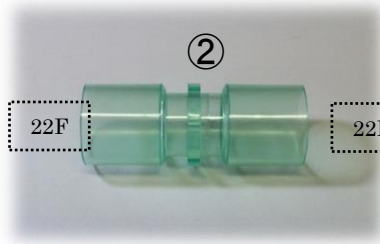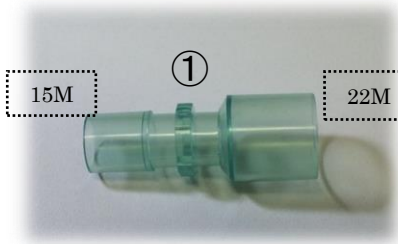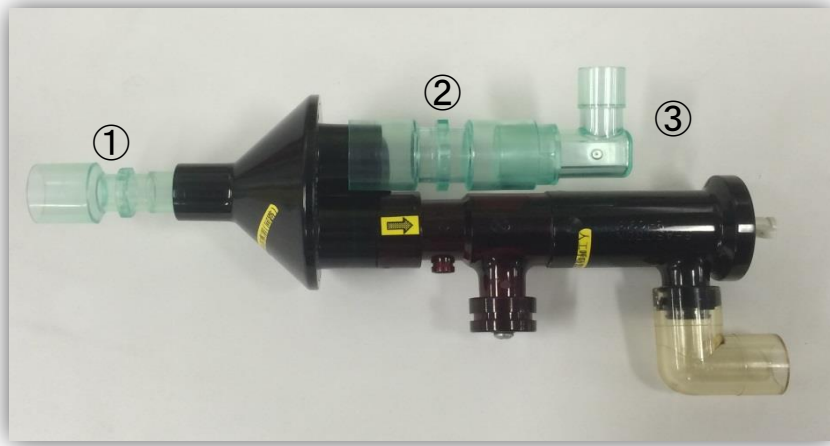

パーカッションエア・ジャパン株式会社
東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル6階
03-3233-0766

REV 4.1-2014